

Viss medicinerig eller medicinska tillstånd kan påverka resultatet på ditt graviditetstest:

- Läs alltid tillverkarens instruktioner angående eventuell medicinerig innan du genomför testet.
- Fertilitetsmedicin som innehåller hCG kan ge missvisande resultat (dessa fertilitetsmedicin ges normalt via injektion och att testa för snart efter injicering kan ge ett falskt positivt resultat).
- Andra fertilitetsbehandlingar (som klomifencitrat), smärtstillande medel och hormonella preventivmedel (t.ex. p-piller) påverkar inte resultatet.
- Om du nyligen har slutat använda hormonella preventivmedel eller använder fertilitetsbehandlingar som klomifencitrat kan din mens vara oregelbunden, vilket gör att du testar för tidigt.
- Om du nyligen har varit gravid (även om graviditeten inte var fullgången) kan du få ett falskt positivt resultat.
- Utomkvedshavandeskap, cystor i livmodern, klimakteriet och vissa väldigt sällsynta medicinska förhållanden kan ge felaktiga resultat.
- Om resultatet från testet visar att du är gravid, är det ändå möjligt att du senare upptäcker att du inte längre är det på grund av att graviditeten avbrutits spontant, vilket kan förekomma vid ett tidigt skede i graviditeten.
- Om du får oväntade resultat bör du diskutera dem med din läkare.

Clearblue Advanced fertilitetsmonitor kan användas för att graviditetstesta dig genom att den upptäcker graviditetshormonet hCG i din urin. I laboratorietester har den visat sig vara över 99 % rättvisande när det gäller att upptäcka graviditet från dagen för väntad mens.

Clearblue rekommenderar att du gör testet från dagen för väntad mens. Graviditetshormonen ökar dock tidigt i början av graviditeten och Clearblue Advanced fertilitetsmonitor kan användas för att testa för graviditet upp till 3 dagar innan din väntade mens. I kliniska tester med tidiga graviditetstester gav Clearblue Advanced fertilitetsmonitor följande resultat:

Antal dagar före beräknad mens	% tester från gravida kvinnor som påvisade graviditet
-1	96%
-2	91%
-3	74%



De här testerna får enbart användas för att utföra graviditetstest med Clearblue Advanced fertilitetsmonitor. De kan inte användas med någon annan Clearblue-monitor. Läs instruktionerna som medföljer monitorn innan du använder de här testerna. När du använder monitorn för första gången måste du ställa in en ny cykel innan du gör ett graviditetstest.

Om du har tappat bort dina användarinstruktioner kan du beställa nya genom att ringa Clearblue kundtjänst eller hämta en kopia från [www.clearblue.com](http://www.clearblue.com).

**Hur exakt är Clearblue Advanced fertilitetsmonitor?**

I laborietester har Clearblue Advanced fertilitetsmonitor visat sig vara över 99 % rättvisande när det gäller att upptäcka graviditet från dagen för väntad mens.

 Produktrådgivning är tillgänglig helgfri måndag till fredag mellan 09.00 och 12.00. Det kanske inte alltid är möjligt att tala med en svensk rådgivare och dina samtal blir då besvarade på engelska.

**020 100 507**  
Samtalen är gratis och spelas in för träning och kvalitetskontroll. Vänligen ha [LOT]-numret tillgängligt.

**www.clearblue.com**

Svenska

**Resultatet på ditt graviditetstest**



Ditt resultat är "Gravid" och du bör rådfråga din läkare/barnmorska om vad du kan göra härnäst.




Ditt resultat är "Inte gravid". Du kanske inte är gravid eller (om du har testat innan din väntade mens) också är nivån av graviditetshormoner inte är tillräckligt hög för att testet ska känna av den. Testa igen när det är dags för din mens.

Om du testar på dagen för väntad mens och resultatet fortfarande är negativt så kan du testa igen inom tre dagar. Om det här testet påvisar att du inte är gravid och du fortfarande inte har fått din mens bör du kontakta din läkare/barnmorska.







**Fel vid test**

Om ett fel inträffar under testning visas ett felmeddelande på skärmen. Se instruktionerna för monitorn för mer information.

Clearblue är ett registrerat varumärke.  
 Tillverkare: SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH, Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Genève, Schweiz.  
 © 2014 SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH. Med ensamrätt.

**Förvara oåtkomligt för barn.**  
**För in vitro diagnostisk användning. IVD**  
 Den här apparaten är avsedd för hemmabruk. Ska ej intas.  
 Inte för invärtes bruk.  
 Förvara torrt vid normal rumstemperatur.  
 Använd inte ett test om folieomslaget är skadat.  
 Använd inte ett test som har passerat utgångsdatum.



	Tillverkare		Återanvänd inte
	Partnummer		In vitro diagnostisk medicinsk apparat
	Bäst-före-datum		Temperaturlintervall 2 °C-30 °C

## Att testa

Monitorn efterfrågar endast fertilitetstest. Den beräknar dagen för väntad mens, men du kan göra ett graviditetstest vilken dag som helst så länge du har en cykel inställd. Du gör bara ett test under ditt testintervall, men om du får ett felmeddelande kan du göra om det med ett nytt test. Om du vill samla din urin för att testa vid ett senare tillfälle, till exempel om du behöver gå på toaletten innan testintervallet startar, använder du en ren, torr behållare och förvarar den i rumstemperatur tills du är redo att testa. Kom ihåg att testa inom testintervallet.


- 1 När du är redo att testa, välj rätt test. Fertilitetstestet har vit folie.



- 2 Öppna folien, ta ut testet och använd det omedelbart.



Håll inte testet med uppsugningsdelen pekande uppåt då detta kan påverka resultatet.

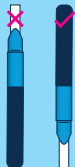

- 4 Välj testmetod:

Kissa på testet



Håll uppsugningsdelen pekande nedåt och kissa på den i 3 sekunder.



ELLER

Doppa testet




Samla ett urinprov i en ren, torr behållare och doppa uppsugningsdelen i urinen, enligt bilden, i 15 sekunder.



- 5 Ta av hylsan.



- 6 Placera hylsan över uppsugningsdelen. Torka av eventuellt överflödigt urin.

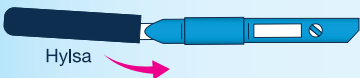


- 7 Sätt omedelbart in testet i monitorn. Om monitorn är avstängd, sätt på den igen och vänta tills Clearblue försvinner från skärmen innan du stoppar in testet.

- 8 Hitta testöppningen.




- 9 Håll monitorn rakt eller placera den på ett jämnt underlag.


- 10 Sätt in testet med det avskurna hörnet nedåt och den färgade sidan pekades till höger.

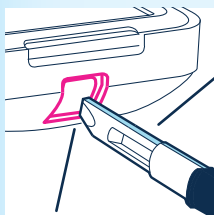

Avskuret hörn nedåt

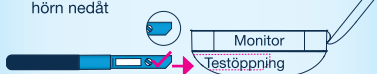

- 11 Tryck in testet tills du hör ett klick.

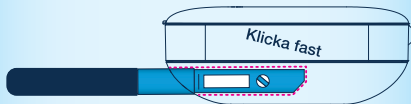

### GÖR INTE FÖLJANDE

Sätt **inte** in uppsugningsdelen i monitorn.



Sätt **inte** in testet med det avskurna hörnet uppåt.



Sätt **inte** in hylsan i monitorn.



- 12 Monitorn bekräftar om testet har satts in korrekt och identifierar om det är ett fertilitets- eller graviditetstest. När den här processen är slutförd visas en nedräkning i skärmen.



Ta inte bort testet under nedräkningen. Om du tar bort testet för tidigt visas ett felmeddelande.

Skärmen stängs av efter 1 minut, men monitorn fortsätter att analysera testet. Testlampan blinkar.

- 13 Vänta 5 minuter på resultatet.

- 14 Om du sätter på monitorn igen visar skärmen hur länge du måste vänta. När testet är slutfört hörs en larmsignal och lampan slutar att blinka.

- 15 Om monitorn är avstängd, sätt på den igen och ta bort testet.

- 16 Läs av resultatet. Resultatet kan enbart läsas av på monitorn och kan inte räknas ut med hjälp av några linjer som eventuellt syns på testet.

- 17 Släng testet med det vanliga hushållsavfallet. Återanvänd aldrig ett test.